

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。


電動ベッドの機能

背上げ機能




起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能

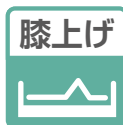

背上げするとき体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能

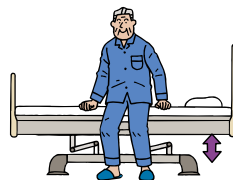

ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



ラクリアモーション

楽匠+ らくしょうプラスシリーズ 楽匠Z らくしょう Zシリーズ



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらくモーション


楽匠+ らくしょうプラスシリーズ 楽匠FeeZ らくしょう フェーズシリーズ



楽匠Z らくしょう Zシリーズ 楽匠S らくしょう Sシリーズ rento らんと シリーズ

ひとつのボタン操作で、からだがズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。


介護用ベッド 製品開発の変遷

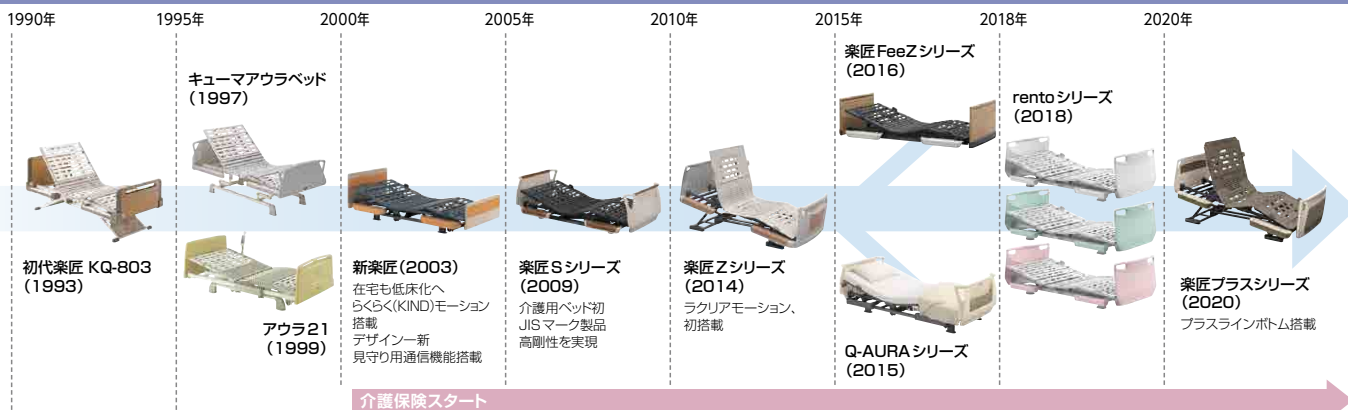

電動ベッドのサイズ


■幅

83cm

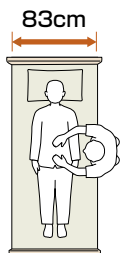


接近しやすく介護がしやすい。

91cm

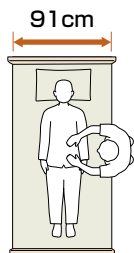

ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。


100cm

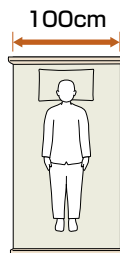

大柄の方でも十分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


■長さ

ミニ

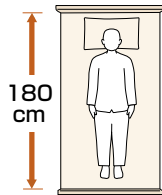


適応身長を目安
150cm未満

レギュラー

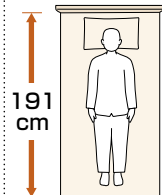

適応身長を目安
150cm以上

ロング

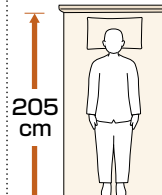

適応身長を目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

※実際の寸法につきましては、各種ベッドのページをご覧ください。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.28

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.36

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の脚やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.34


ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.35

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.18・22・23・24・26

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

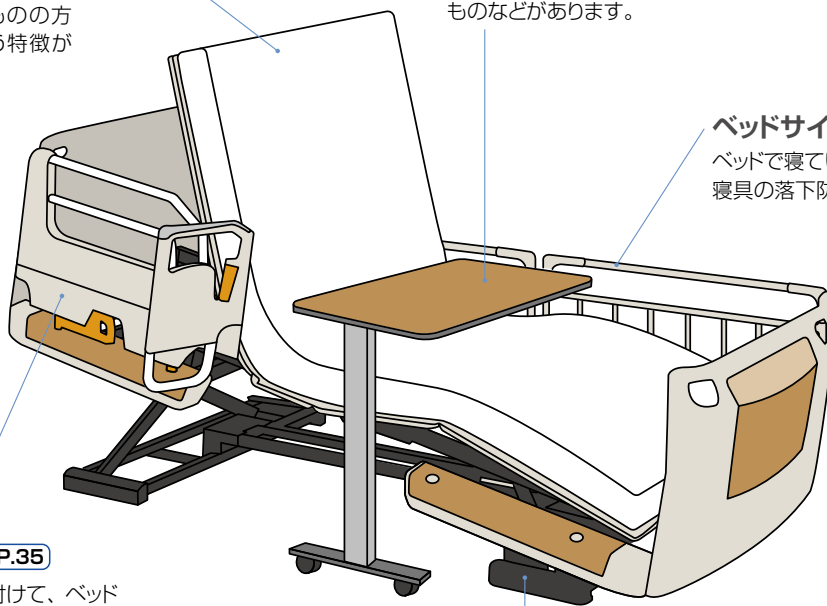

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて

JIS T 9254



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。

JIS T 9254

